



## **GHOST Abdeckhaube für med. Geräte**

### **Produktbeschreibung**

Unsere Abdeckhauben für medizinische Geräte sind nicht nur praktisch sondern auch hygienisch und einfach zu händeln. Unser Modell „Ghost“ ist für viele medizinische Geräte geeignet und kann in den unterschiedlichsten Größen passend für Sie angefertigt werden – sprechen Sie uns dazu einfach an. Sie schützt zuverlässig vor Verunreinigung und Staub.

Die Forderung der Behörden, auf den ersten Blick Außen und Innen zu erkennen, wir hiermit erfüllt.

Jede Haube wird mit einer Aufhänge-schleufe versehen. Somit muss die Abdeckhaube nicht auf dem Boden liegen, auch wenn es mal schnell gehen muss. Fordern Sie ein Maßblatt an und Sie erhalten unser Angebot!

Diese Abdeckhauben werden in unserem Werk in Deutschland gefertigt – Made in Germany.

Rogino-Products GmbH  
Max-Planck-Straße 16  
53501 Grafschaft  
Deutschland

Tel.: 02225 91 98-0  
Fax: 02225 91 98 99  
info@rogino.de  
www.rogino.de

**Made in Germany**

## **WASCHANLEITUNG FÜR GHOST ABDECKHAUBE FÜR MED. GERÄTE**

- Für die normale Reinigung und Desinfektion verwenden Sie bitte nur farblose VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V.) zugelassene Desinfektionsmittel. Unsere Ghost Abdeckhauben können Sie absprühen oder mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.
- Jodhaltige (farbige) Desinfektionsmittel können zu Verfärbungen führen.
- Ghost Abdeckhauben können Sie bis 95° C waschen.
- Ghost Abdeckhauben können Sie gem. RAL-GZ 992-3 waschen.
- Ghost Abdeckhauben können Sie im desinfizierenden Waschverfahren waschen.
- Ghost Abdeckhauben können Sie im Tumbler bis 120° C trocknen.
- Ghost Abdeckhauben können Sie in der VDV-Kammer bei 105° C sterilisieren.
- Ghost Abdeckhauben haben einen hohen PU-Anteil (PU=Polyurethan). Deshalb empfehlen wir, auf Chlor basierte Bleichmittel (z.B. Natrium-hypochlorit) zu verzichten und auf persäurehaltige (z.B. Peroxycarbonsäuren, Peressigsäure) Waschmittel zurückzugreifen. Im Zweifel fragen Sie bitte bei uns an.
- Ghost Abdeckhauben dürfen nicht gepresst werden. Vermeiden Sie daher die Reinigung in der Waschstraße. Wir empfehlen stattdessen die Reinigung im Wasch-Schleuder-Automat.
- Ghost Abdeckhauben dürfen nicht gebügelt werden.

**Tipp 1:** Legen Sie in den Trockner ein Frotteehandtuch dazu und der Trocknungsvorgang geht etwas schneller.

**Tipp 2:** Verfärbungen lassen sich oftmals entfernen, indem Sie Ghost Abdeckhauben bei 95° C mit normalem Haushaltswaschmittel waschen.

**Tipp 3:** Zur Entfernung hartnäckiger Verfärbungen empfehlen wir Tana Apesin AP 100 (Tana Chemie, Mainz) oder Perform (Schülke & Mayr, Norderstedt). Lösen Sie die Mittel gemäß der Gebrauchsanleitung in Wasser auf und tragen Sie die Lösung mit einem Schwamm auf.

**Tipp 4:** Bei Produkten mit Klettverschlüssen sollten Sie vor dem Waschen alle Verschlüsse schließen, dann können sich keine Fusseln und Schwebeteile aus der Waschlauge im Klett oder Flauschband verhaken.

Rogino-Products GmbH  
Max-Planck-Straße 16  
53501 Grafenschaft  
Deutschland

Tel.: 02225 91 98 -0  
Fax: 02225 91 98 99  
info@rogino.de  
www.rogino.de