



FALLSCHUTZSACK RP

Produktbeschreibung

Unser GEFATEX® Fallschutzsack RP kann das Verletzungsrisiko bei Stürzen aus dem Bett beziehungsweise die Schwere von Verletzungen bei solchen Stürzen deutlich reduzieren.

Der GEFATEX® Fallschutzsack RP besteht aus mehreren Schichten. Bei Nicht-Gebrauch kann der Sack hochkant gelagert oder an den eingearbeiteten Griffen z.B. an der Wand aufgehängt werden. Entsprechende Aufhängungen sind als Zubehör bei uns erhältlich.

Dieser Fallschutzsack kann auch bei Niederflurbetten eingesetzt werden, denn selbst Stürze aus niedriger Höhe können sehr schmerzhaft sein.

Der GEFATEX® Fallschutzsack RP ist in den Größen

Standard	(110 x 170 cm),
XL	(110 x 190 cm)
und XXL	(130 x 220 cm) erhältlich.

Rogino-Products GmbH
Max-Planck-Straße 16
53501 Grafschaft
Deutschland

Tel.: 02225 91 98 -0
Fax: 02225 91 98 99
info@rogino.de
www.rogino.de

Made in Germany

WASCHANLEITUNG FÜR FALLSCHUTZSACK RP

Unser Fallschutzsack RP besteht aus einer Hülle und einem Innenleben. Die Hülle besteht aus GEFATEX® Material, welches wischdesinfizierbar ist und bei 95° C gewaschen und anschließend im Tumbler getrocknet werden kann. Sollte die Füllung verschmutzt sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Zur Wischdesinfektion und zur Entfernung von Flecken beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Für die normale Reinigung und Desinfektion der GEFATEX® Außenhülle verwenden Sie bitte nur VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V.) zugelassene Desinfektionsmittel. Sie können sie absprühen oder mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen. Sie können auch die Wipes einsetzen.

- Jodhaltige (farbige) Desinfektionsmittel können zu Verfärbungen führen.
- Bei der Desinfektion mit BACILLOL® AF muss GEFATEX® vor der Wiederverwendung komplett abgetrocknet sein, da sonst Risse im Material entstehen können.

Rogino-Products GmbH
Max-Planck-Straße 16
53501 Grafschaft
Deutschland

Tel.: 02225 91 98 -0
Fax: 02225 91 98 99
info@rogino.de
www.rogino.de